

Aquacut de fin de día de rutina

1. Al final del día la Aquacut debe purgarse de toda el agua y el polvo en su tubo y cámaras de dosificación.
2. Para ello el poder del Aquacut abajo. Retire las tapas de la cámara de dosificación. Retire todos los recipientes de polvo en su Aquacut. Apriete las tapas de cámara de dosificación en su lugar.
3. Retire el tanque de agua y desechar el agua no utilizada. Con el depósito de agua sigue siendo eliminar el poder del Aquacut copia de seguridad.
4. Presionar a fondo el pedal del pie mientras sujeta el mango hacia un cubo de basura. Añada la punta del mango. Debería ver agua y polvo procedente de la punta del mango. Mantener el pedal pisado a fondo hasta que no hay más agua y polvo procedente de la manija. Por último, cambiar a la cámara de dosificación opuesto, mientras que el pedal es todavía totalmente deprimido, asegurando sin agua o en polvo viene de la punta del mango de nuevo.
5. Encienda el Aquacut abajo.
6. Vuelva a colocar el tanque vacío en este momento. Vuelva a llenar el tanque con agua destilada al día siguiente.

NOTA: Cuando el transporte de la Aquacut cualquier lugar, incluso desde el contador a contador, siempre quitar los botes de polvo y tanque de agua antes de mover el Aquacut. Si no lo hace, se traducirá en un derrame sobre de polvo en las cámaras de dosificación, que conduce a polvo obstruido líneas y un lío agua dentro de su Aquacut.