

**Si su MK5 procesador de la película, (Intra-X o Extender), tiene un código de error que hay que restablecer, siga los pasos que se indican a continuación para realizar un reinicio de la máquina. En cuestión de minutos usted estará de pie y funcionando de nuevo con un mínimo de tiempo perdido.**

1. Encienda el equipo está apagado.
2. Quite el cable de alimentación de entrada.
3. Retire el tornillo situado por encima de la toma de corriente de entrada.
4. Retire la tapa azul de control.
5. Desconecte el cable gris, cinta plana que se conecta a la pantalla.
6. Deje el cable gris, cinta plana desconectado por el momento.
7. Vuelva a colocar la tapa azul de control.
8. Vuelva a conectar el cable de su máquina de potencia de entrada.
9. Encienda la máquina está encendida. La pantalla de su máquina va a estar en blanco en este momento.
10. Espere unos tres minutos. Esto permite a su equipo para restablecer plenamente.
11. Apague la máquina de apagado después de esperar los tres minutos.
12. Quite el cable de su máquina de potencia de entrada.
13. Retire la tapa azul de control.
14. Vuelva a conectar el cable gris, cinta plana de la pantalla. Asegúrese de que el conector blanco pequeño aún está conectado a la pantalla de su máquina.
15. Vuelva a colocar la tapa azul de control.
16. Vuelva a colocar el tornillo por encima de la toma de corriente de entrada.
17. Vuelva a conectar el cable de su máquina de potencia de entrada.
18. Encienda la máquina está encendida.

19. El código de error debe desaparecer en este momento y su máquina va a estar en su Ciclo de Iniciación.

20. Deje que la máquina completar su ciclo de iniciación, la máquina contará hacia atrás desde 150.

21. Después de la cuenta atrás se ha completado, la pantalla le indicará una de las dos condiciones. Se podría indicar tlo, (baja temperatura), si la máquina no ha estado en el tiempo suficiente para calentar los productos químicos a su temperatura adecuada o puede indicar tres guiones horizontales en el centro de la pantalla si los productos químicos ya están a su temperatura adecuada . Si tlo se muestra que puede tardar de 10 a 15 minutos para tlo que se vaya.

22. Cuando la máquina se indican tres guiones horizontales en el centro de la pantalla táctil del sensor de la máquina para permitir el inicio de su equipo para completar un ciclo normal.

23. Ahora está listo para procesar la película de nuevo.